
Infection Control Kit Clean Catalog

清潔な器具をオートクレーブへ





2l ¥6,500

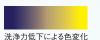

CAE・血液たん白分解酵素配合

スーパーLM-CAE(アルカリ性)

スーパーLM・CAEはCAEと血液・たん白分解酵素を配合した外科器 具用防錆清浄液です。クランケに使用後の外科用器具に付着した血液・ たん白や脂肪を強力に分解し、高い不活性効果を発揮します。液の色が 洗浄効果の低下とともに青色から黄色に変化し、試験紙を使用する手 間を省き、液の交換タイミングを確実に目で判断出来ます。また、強力な 防錆剤を配合し、器具を錆びにくくします。

成 分:CAE、エタノール、たん白分解酵素、アルカリビルダー、防錆剤、 色素、非イオン界面活性剤、精製水、他

使用方法: ●浸漬清浄の場合

バー、リーマー、ファイル等の小器具類	2倍希釈液	10分以上浸漬
インスツルメント類	30倍~50倍希釈液	30分以上浸漬

●超音波洗浄の場合

バー、リーマー、ファイル等の小器具類	10倍希釈液	_
インスツルメント類	50倍~100倍希釈液	_







色付き 4ℓ ¥11,500

2l ¥6,200

4ℓ ¥11,500

イソプロピルメチルフェノール・血液たん白分解酵素配合

メディカエースV/P(アルカリ性)

メディカエースV/Pはイソプロピルメチルフェノールと血液・たん自分解酵素を配合した外科器具用防錆清浄液です。クランケに使用後の外科用器具に付着した血液・たん白や脂肪を強力に分解し、一次処理液として器具移送時の感染防止に大きな役割を果たします。また、強力な防錆剤を配合し、器具を錆びにくくします。

※本液は透明ですが、液の劣化により色が変化するタイプもあります。

成 分: イソプロピルメチルフェノール、エタノール、たん白分解酵素、アルカリビルダー、防錆剤、非イオン界面活性剤、精製水、他

使用方法:●浸漬清浄の場合

バー、リーマー、ファイル等の小器具類	2倍希釈液	10分以上浸漬
インスツルメント類	30倍~50倍希釈液	30分以上浸漬

●超音波洗浄の場合

バー、リーマー、ファイル等の小器具類	10倍希釈液	-
インスツルメント類	50倍~100倍希釈液	_

小器具用防錆清浄液

簡単2倍希釈で小器具を除菌・洗浄



1.5l ¥2,600

4ℓ ¥7,300

除菌成分W配合

スチールライザー(中性タイプ)

イソプロピルメチルフェノールと塩酸アルキルジアミノエチルグリシンを効果的に配合した中性タイプの小器具用防錆清浄液です。器具に付着した血液・唾液等の汚物に対し、優れた洗浄力と除菌力があります。

成 分: 界面活性剤(1%ラウラミドプロピルベタイン)、イソプロピルメチルフェノール、塩酸アルキルジアミノエチルグリシン、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、防錆剤、他

使用方法:●浸漬清浄の場合

バー、リーマー、ファイル等の小器具類 2倍希釈液 10分以上浸漬





2l ¥4,000

4ℓ ¥7,500

塩化ベンザルコニウム・血液たん白分解酵素配合

スーパーライザー

塩化ベンザルコニウムを主成分とした小器具用の防錆清浄液です。一般細菌に対し優れた除菌力と、器具に付着した血液・唾液等の汚物に対し優れた洗浄力と除菌力があります。

使用方法:●浸漬清浄の場合

バー、リーマー、ファイル等の小器具類

2倍希釈液

10分以上浸漬

石膏トラップ・排唾管洗浄剤

防カビ剤・防臭剤配合強力パイプクリーナー



4l ¥5.800

イソプロピルメチルフェノール配合

パイプスルークリア

ホース内や管内、石膏トラップ等の黒カビや嫌気性バクテリアを強力な除 菌力で防止します。特に悪臭の元を断ち、抜群の消臭効果が得られます。 付着した汚れやぬめりを強力にはく離し洗浄します。ゴムホースや金属 を腐食させる成分は配合していません。

分:防菌剤、防カビ剤、香料、色素、非イオン界面活性剤、精製水、 イソプロピルメチルフェノール、たん白分解酵素、他

使用方法:●スピットン、排水パイプの場合

10倍希釈液300mlを流入し翌朝診療開始前に水を流してください。

●バキューム、排唾管の場合

10倍希釈液300mlを吸引させ翌朝診療開始前に水を吸引させて流してください。

●石膏トラップ脱臭の場合

原液200mlを直接トラップに流入してください。

●洗濯機槽内のカビ洗浄の場合

原液200mlを槽内に注入し自動洗浄してください。(リネン類は入れない)

除菌成分配合衣類用洗剤

洗濯槽内も除菌しながら強力洗浄



1.5l ¥2.900

4£ ¥10.200

除菌成分W配合

リネンブライト(弱アルカリ性)

白くソフトに洗い上げる洗浄力と優れた除菌力、消臭力があり、白衣・ タオル・エプロン・ガーゼ・リネン類等を衛生的に洗浄できます。また、 洗濯槽内も同時に除菌できます。

分:界面活性剤(25%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸、ポリオキ シエチレンラウリルエーテル、ラウラミドプロピルベタイン)、ジエ チレングリコールモノブチルエーテル、イソプロピルメチルフェ ノール、塩酸アルキルジアミノエチルグリシン、水軟化剤、蛍光 増白剤、他

使用方法: ●洗濯機の場合

水50ℓに対して50mℓ

●つけおき洗いの場合

水10ℓに対して10mℓ

天然植物性分解消臭剤

洗濯機専用消臭剤

臭いを無臭物質に変えて元から分解



無臭性,無公害性

消臭剤 (液体)

4ℓ ¥13,000

無臭性·無公害性

マルクスメル#410

天然植物性を主原料としたマルクスメル#410は、化学薬品で処理しに くい臭いの複合物質を強力に消臭します。ベンキ、生ゴミ、病室内、床面 等にスプレー等が最適です。低公害性であり、重金属類等は一切配合し ておりません。(日本食品分析センター)香料で臭いをまぎらわす芳香剤 ではなく、臭いそのものを無臭物質に変える分解消臭剤です。

分:植物性油脂、植物性乾留精製油脂、界面活性剤、他

使用方法: 加湿器、スプレー式を利用して噴霧することにより砂速消臭します。使用 量は1㎡に対して約5cc~10ccを基準として悪臭の濃度により、適度に 増減してください。

マルクスメル#800L

天然植物性を主原料としたマルクスメル#800Lは、香料で臭いをまぎら わす芳香剤ではなく、臭いそのものを無臭物質に変える分解消臭剤です。 一般洗剤に混ぜて使用すると白衣・タオル・エプロン・ガーゼ・リネン類 等を消臭できます。除菌効果のあるリネンブライト(推奨)を併用すること で、さらに除菌・消臭効果を得ることができます。

分:植物性油脂、植物性乾留精製油脂、界面活性剤、他

使用方法: ●洗濯機の場合

約50ℓの水量に対して20mℓを洗剤と合わせてご使用ください。

手指用殺菌•消毒石鹼液

手を優しく保湿しながら殺菌洗浄



4ℓ ¥6,000 イソプロピルメチルフェノール・保湿剤配合

ハンドライザー(中性タイプ)

500mℓ ¥1,600

病院・歯科医院・保健所・食品工場・製薬工場等、あらゆる場面・用途で 殺菌洗浄できます。保湿剤を配合していますので、手肌に刺激や手荒れ が極めて少ないマイルドな石鹸液です。素早い泡切れで、手の荒れや すい方に最適です。

分:イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩、パラベン、プロピレン グリコール、安息香酸ナトリウム、青色403号、香料、他

使用方法:

泡ポンプから適量を手に取り、水で洗い流してください。

強力血液溶剤

リネン類に付着した頑固な血液を強力に溶解



500ml ¥2,800

酵素剤配合

マルククリーンBB-2

乾燥した凝固血液を酵素の力で溶解し、除菌にも優れる血液溶解剤で す。除菌剤として塩化ベンザルコニウムが配合されているので、器具・ リネン類・床・壁等に付着した血液等、広範囲に使用できます。また、 天然オレンジオイルの添加により、強力な洗浄効果を発揮します。

分:酵素剤、天然オレンジオイル、塩化ベンザルコニウム、血液溶解 剤、非イオン界面活性剤、他

使用方法:

血液の乾いた頑固な洗浄には直接スプレーしてください。白衣・タオル・ エプロン・ガーゼ・リネン類に付着した血液等には直接スプレーし、3~10 分間放置後、洗濯機で洗浄してください。(ぬるま湯をご使用になると洗浄 力がアップします。)洗浄後のすすぎ時には、十分に水洗してください。

アルコール除菌・清浄剤

中性タイプでベタつきのない多用途除菌スプレー



500ml ¥2,800

塩化ベンザルコニウム配合

マルククリーンBL-1

マルククリーンBL-1は塩化ベンザルコニウムを配合し、スプレー型にした アルコール清浄剤です。中性タイプでベタつきが少なく、多用途での衛生 管理にご使用いただけます。

分:塩化ベンザルコニウム、日本薬局法グリセリン、エチルアルコール、 精製水、他

使用方法: ●スタンダードスプレータイプの場合

ハンドピース類、ユニット及び周辺機器類、印象採得面、石膏模型、 スリッパ、シューズ等にスプレーで噴霧し、ガーゼまたは清潔な布で清拭 してください。

●ミクロスプレータイプ

使用箇所に直接噴霧して乾燥させてください。



スタンダードスプレー 500ml ¥3,200

CAE配合

マルククリーンCA

マルククリーンCAはCAEを配合し、スプレー型にしたアルコール清浄剤 です。中性タイプでベタつきが少なく、多用途での衛生管理にご使用 いただけます。

分:CAE、日本薬局法グリセリン、エチルアルコール、精製水、他

使用方法: ●スタンダードスプレータイプの場合

ハンドピース類、ユニット及び周辺機器類、印象採得面、石膏模型、 スリッパ、シューズ等にスプレーで噴霧し、ガーゼまたは清潔な布で清拭 してください。

使用箇所に直接噴霧して乾燥させてください。

オートクレーブ用洗浄・防錆剤

常に器具を錆から守りオートクレーブ内を洗浄



1 £ ¥5.200

クラスN専用

メタコートAR-H

メタコートAR-Hをオートクレーブ水槽タンクに注入し、滅菌作動させると、 滅菌中の蒸気やヒーター熱により発生する酸化鉄皮膜を防止するので、 器具を優しく保護します。また、洗浄効果を持っているので、オートクレーブ 内を清潔に保ちます。含まれる成分は全て化粧品グレードを使用し、安全 性が高く、排水・環境にも配慮した防錆剤です。

※ガス滅菌器、ケミクレーブ、クラスS・Bの滅菌器には使用できません。

※スチールバーはメタコートAR-Hのみでは錆を防ぐことができませんが、メタルケアを 使うことで回避できます。

分:金属腐食防止剤、消臭剤、精製水、他

使用方法:●水道水の場合

1週間に1度、水を交換時に再度100mlを注入してください。(1本/約2ヶ月半)

2週間に1度、水を交換時に再度100mlを注入してください。(1本/約3ヶ月) ※1週間経過時点で50mlを追加してください。

オートクレーブ用強力洗浄剤

オートクレーブ内の定期的な大掃除に



30g×2 ¥1.500

クラスN専用

クレーブウォッシャー

クレーブウォッシャーは、柑橘系にも含まれるクエン酸を効果的に配合した オートクレーブ用強力洗浄剤です。オートクレーブは、定期的なメンテナン スによるクリーニングをしていないと、チャンバー内や、水槽タンク、普段見 えない管内に汚れがこびり付きます。この汚れはオートクレーブの故障・エ ラーにつながる原因となります。臭いの原因にもなりますので、「クレーブ ウォッシャー」を使うことにより、強力にオートクレーブ内を洗浄し、器械内部 をきれいにすることができます。きれいな状態のオートクレーブは、エラーや 故障が極めて少なくなります。

分:有機酸混合(食品添加物クエン酸)、植物性油消臭剤、イオン封鎖剤、他

使用方法:

- ①クレーブウォッシャーA(水槽タンク用)を定量まで水を入れた水槽タンク に注入し、クレーブウォッシャーB(チャンバー用)をヒーター部分に振りか けて滅菌作動してください。
- ※滅菌物は入れずに滅菌作動してください。
- ②滅菌作動が終了したら、電源をただちにOFFにし、乾燥は絶対に行わ ないでください。
- ③圧力・温度があがったのを確認しドアを開き、チャンバー内を清潔な布で 水拭きし、仕上げてください。
- ④水槽タンクの水を排水し、再度水を入れ、残っている汚れを全て排出し
- また、汚れの度合いによって再度、注水・排水を繰り返してください。

クラスN専用オートクレーブ用洗浄・防錆剤 + 強力洗浄剤



セット価格 ¥6.500

オートクレーブ用防錆剤メタコートAR-H 1ℓ(消臭剤配合) オートクレーブ用強力洗浄剤クレーブウォッシャー(A30g+B30g) 日常の洗浄・防錆と定期的な大掃除を

メタコートクレーブウォッシャーセット

メタコートAR-Hとクレーブウォッシャーのセットです。初めてご使用になる場合、クレー ブウォッシャーを使用し大掃除をしてからメタコートAR-Hを使用することにより、オート クレーブ内を清潔に保ちます。また、滅菌中の器具を錆びさせず、器械内部を洗浄しな がら滅菌できます。クレーブウォッシャーは $2\sim3$ ヶ月に1度の使用が効果的です。メタ コートAR-Hを水道水で使用すると約2ヶ月半でなくなるので、新たにセットをご使用す ることで理想のサイクルができます。オートクレーブのエラー・故障が極めて少なくなる ので、滅菌作業がはかどります。

※使用方法・成分については、別途メタコートAR-H、クレーブウォッシャーをご覧ください。

錆びてしまったバーを復元



1 £ ¥6,500

パワーリキッド錆取り

バーやドリルの錆や黒い変色を素早く落とし復元します。オートクレーブで、熱焼けしたステンレスバットやピンセット・鉗子類の汚れを落とします。

成 分:除錆剤、防錆剤、浸透剤、他

使用方法: ●スチールバー・ドリルの錆や黒い変色を落とす場合

原液に5分間浸漬し、ナイロンタワシでこすって仕上げてください。直ちに水洗し、メタルケア防錆剤に10分間浸漬して錆止めしてください。ガーゼまたはタオルで水分を取り乾燥してください。

●熱焼けしたステンレスバットやピンセット・鉗子類の汚れを落とす場合

ナイロンタワシにパワーリキッド原液を含ませ変色部分をこすって落として ください。(汚れが頑固な場合はパワーリキッドに5分間浸漬してナイロンタ ワシでこすると効果的です。)水洗し乾燥してください。

スターターキット

万が一錆びてしまった時のための応急キット



錆取り&防錆スターターキット

ご要望から生まれた小さいタイプ200mℓの錆取り・防錆セットです。付属のシャーレを使い、いざという時の応急キットとして役立ちます。万が一錆びてしまったバーやドリル、ステンレスバットの熱焼けも、このキットがあればすぐに解決できます。「一医院に1つ」常備してみてはいかがでしょうか。

キット内容:パワーリキッド錆取り200mℓ、メタルケア防錆剤200mℓ、専用 シャーレ2つ、ナイロンタワシ、他

※使用方法・成分については、別途パワーリキッド錆取り、メタルケア防錆剤をご覧ください。

浸漬しておくだけでバーを錆から守り、除菌



1 £ ¥5,500

メタルケア

耐熱性に優れ、滅菌中のバー・ドリルの錆や黒い変色を強力に防止します。 エチルアルコールを配合しているので、除菌効果があります。安全性が 高く、乾燥時、器具表面に結晶が付着することがありません。また排水の 際に環境にも配慮しています。

成 分:有金属腐食防止剤、エチルアルコール、精製水、他

使用方法: ●スチールバー・ドリルをオートクレーブで滅菌する場合

洗浄液で洗浄後、バーやドリルがガーゼからはみ出ないように包み、 メタルケア原液にそのまま10分間浸漬し、軽く絞り滅菌バッグに入れて オートクレーブで滅菌してください。

ハンドピース類・鉗子・プライヤー等の 潤滑及び防錆用

ドイツテクノロジーが生んだ 無味・無臭・無公害、安心安全の潤滑スプレー



80ml ¥1,980 480ml ¥7,500

ターモデントオイルスプレー

USDA(米国農務省食品安全基準合格品)H-1グレード認可製品です。 石油系・鉱物油は一切配合しておりません。あらゆる潤滑を必要とする部分に安心・安全に使用でき、ハンドピース類・外科用器具等への注油に非常に効果的です。低粘性で、耐酸化・耐劣化に優れ、サラサラしています。

成 分:合成潤滑油(動植物油類)

使用方法: ●鉗子類に注油する場合

滅菌前に器具のクロス部分へスプレー後、拭き取り、滅菌バッグに入れて滅菌してください。

●ハンドピース類に注油する場合

ノズルを各メーカーのものと差し替えて注油し、滅菌バッグに入れて滅菌 してください。

インフェクションコントロールキット早見表

予防箇所	対処法	対象製品		効 果
	MAIA	八水衣山	IX/IJIA	<i>从</i> 木
手指	治療・アシスト作業前後は、 手指を十分洗浄・消毒する。 手指を傷つけないよう、10~ 30秒ブラッシングするのが望ましい。	ハンドライザー	泡ポンプから適量を手にとり、水で洗い流す。	清潔感のある爽やかな 洗いごこち、ヌメリ感が なく、手指をいたわる安 心感。
リネン類	血液などの体液で汚染された 白衣・エプロン・タオル・布マ スク・帽子等を、除菌成分配 合の専用洗剤で除菌・洗浄 処理をする。	リネンブライト	洗濯機1回の使用量は50ml。 ※汚れが激しい場合は、浸け置き洗い (20分程度)が効果的。	除菌・洗濯後のリネン類 は、ソフトな洗い上がりと 白さで衛生的に。
外科用器具の洗浄	専用洗浄剤で除菌洗浄(血液・たん白・脂質の洗浄、ウイルス不活化)し、オートクレーブで滅菌処理をする。	メディカエースV/P スーパーLM-CAE	【一次処理】 ●小器具(バー・リーマー) 2倍希釈液に10分以上浸漬。 超音波は10倍希釈液で使用。 ●インスツルメント類 30~50倍希釈液に30分以上浸漬。 超音波は、50~100倍希釈液で使用。	【二次処理】 ●熱処理出来る器具は オートクレーブへ。
オートクレーブによる錆	減菌中の蒸気や乾燥時の ヒーター熱による外科用器具 の酸化鉄皮膜の発生を防止 する。	メタコートAR-H	水槽タンクに100mℓ注入し、滅菌作動 する。	器 具をやさしく保護し、 オートクレーブ内の汚れ・ 臭いを軽減。
鉗子・プライヤー等の クロス部分	たん白付着、錆で固くなった 鉗子、プライヤー、ハサミ、持 針器等の外科用器具の潤滑 に使用。	ターモデント オイルスプレー	オートクレーブ等の滅菌器で、滅菌する 前に器具のクロス部分へスプレー後、 器具表面のオイルをよく拭き取り、滅菌 バッグに入れて滅菌する。	低粘性で、耐酸化・耐劣 化に優れ、ベトつかずに 器具を潤滑できる。
ユニット・キャビネット	ユニットやキャビネットに付着 している汚れを清拭で除菌処 理をする。 ※清拭できない細部は、スプ レーを噴霧する。	マルククリーンBL-1	ユニット周辺機器類の細部にスプレーを 噴霧し、ガーゼ又は清潔な布で清拭する。 ※ユニットの皮革類はアルコールに弱い ので注意する。	ユニット・キャビネットに 付着した汚れを清浄し、 機器類を衛生的に管理 できる。
石膏模型・印象採得面	アルコール製剤を噴霧し、除 菌処理をする。	マルククリーンCA	●石膏模型に噴霧し、30分間以上放置・乾燥してから作業を進める。 ●印象採得面は、血液を水洗した後、噴霧する。	●石膏模型を介して、技工士への感染防止に効果的。 ●アルコールスプレーは揮発性がある為、印象面を変形させにくい。
スピットン・バキューム・ 排唾管・石膏トラップ	血液・唾液・汚物・化学反応物などの洗浄、除菌、消臭。 石膏トラップの脱臭・洗濯機 槽内のカビの洗浄にも有効。	パイプスルークリア	●スピットン・排水パイプの場合 10倍希釈液300mlを流入させ、翌朝 診療開始前に水を流す。 ●バキューム、排睡管の場合 10倍希釈液300mlを吸引させ、翌朝 診療開始前に水を吸引させる。 ●石膏トラップ脱臭の場合 原液200mlを直接トラップに流入する。	バキュームホース内部、スピットン部、排水パイプ内の血液・唾液・汚物の洗浄、除菌、消臭。次の朝、院内は爽やかな香り!

医療・理化学用洗浄剤・消臭剤・防錆剤・潤滑油・介護関連衛生商品 発売元

株式会社 ムラカミメディカル

本社:〒135-0052 東京都江東区潮見1-14-9 半田ビル3F TEL.03-5633-8586 FAX.03-5633-8587

http://www.murakami-m.co.jp/



ご用命は…